

Fakta

CDK: Permanent kateter, Symetrex LT- Rak

Produktnamn	Symetrex LT
Användningsområde	Hemodialys
Reparationskit	Nej

Beskrivning	<p>Permanent CDK till vuxna. Dubbellumen med symmetrisk kateterspets.</p> <p>Ingen specifik artär-venskänkel.</p> <p>Mycket låg recirkulation, lägre än 1 % oberoende av flödesriktning.</p> <p>Kateterspetsens konstruktion ger minimal arteriell insufficiens .</p> <p>Den symmetriska kateterspetsen design samt avsaknad av sidohål minimerar läckage av kärllkateterlås.</p>
Material	Polyuretan
Längd/Storlek	Finns i olika längder, storlek: 15,5 F Längden mäts från kuff till kateterspets.
Design	Double D Θ
Hållbarhet	År, den kan sitta så länge det behövs.
Sterilisering	EO
Förpackningsinnehåll	Basic- set innehåller: Kateter, introducer nål, Guidewire, 2 dilatorer, tunnelerare, delningsbar introducer, 2 korkar
Tillverkare	Medcomp
Inläggningsteknik	Antegrad tunnelering med Seldingerteknik. Kateterspets rekommenderas att ligga i hö förmak. Vid femoral inläggning ska kateterspetsen vara i korsningen vena iliaca och vena cava inferior.
Fakta	För mera information, inläggning etc, se Medcomps hemsida.