


FistulaStop

FistulaStop™ er et hjelpemiddel for å stoppe blødning etter seponering av nåler fra AV-fistel. FistulaStop™ gir et stabilt, jevnt trykk mot innstikkene til blødningen har stoppet.

- Gir ergonomiske fordeler for sykepleier, da statisk arbeid unngås
- Tidsbesparende for sykepleier
- Enkel å bruke
- Kan gjenbrukes til samme pasient
- Leveres parvis i plastbeholder med plass til å notere pasientens navn
- Produsert i miljøvennlig materiale

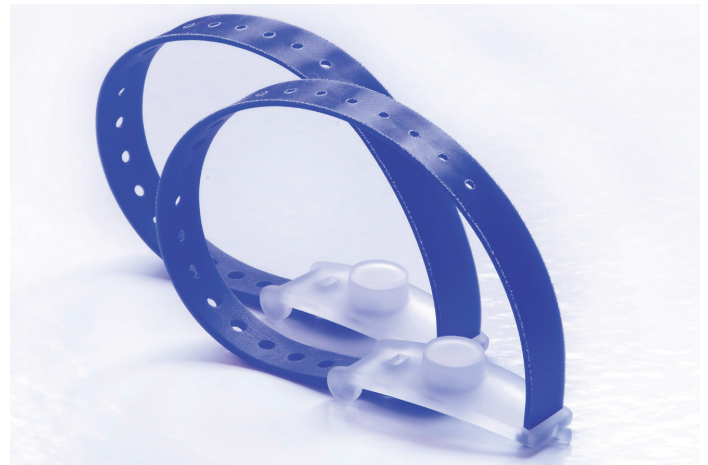

Ved bruk av FistulaStop™

- FistulaStop™ er pasientbundet, kun gjenbrukes på samme pasient
- Legg en tupfer mellom innstikksted og FistulaStop™
- Kontroller at den gjennomsiktige plastdelen ligger rett over innstikket
- Stram båndet slik at det føles behagelig for pasienten og passe stramt slik at blødningen stoppes
- Når blødningen har stoppet, fjernes FistulaStop™ og ønsket plaster legges på innstikkene
- Pasienten må ikke reise hjem med FistulaStop™
- Etter bruk tørkes FistulaStop™ av med desinfeksjonsmiddel. Tåler alkohol.
- Av hygieniske årsaker bør FistulaStop™ skiftes ut hver måned
- Dersom FistulaStop™ blir svært blodig, bør den kastes etter bruk

Bestillingsinformasjon

Bestillingsnummer	Produkt	Pakningsstørrelse
F500	FistulaStop	1 plastboks med 2 stk

Produktbeskyttet, reg.nr CDR 001614173