

Anbefalinger for bytte av Tego®-tilkoblingen



Tego® er en lukket luer-tilkobling med splitmembran, som ikke krever nål. Den er spesielt utformet for å passe sammen med sentrale venekateter for hemodialyse og lignende sentralvenøse kateter.

Tego® festes på kateterløpene, og alle prosedyrer, inklusive skylling av kateteret, skal utføres gjennom Tego-tilkoblingen. Det er viktig å desinfisere Tego® før hver intervensjon.

Tego® er godkjent med tanke på funksjon og mikrobiologiske egenskaper for å benyttes på hemodialysekateter inntil 7 dager før den byttes.

Vi anbefaler at du bytter Tego® ved oppstart av din hver fjerde dialysebehandling. Her beskrives den anbefalte ukesprosedyren for å benytte Tego. Denne er kun veiledende, følg alltid dine lokale prosedyrer for håndtering av dialysekateter.

Hemodialysebehandling 1

1. Desinfiser membranen på Tego®.
2. Aspirere 3-5 ml fra hvert kateterløp for å rense lumen i kateteret. Kast sprøytene.
3. Fjern Tego®.
4. Rengjør det dialysekateterets koplinger med desinfeksjonsmiddel.
5. Koble til nye Tego® på hver lumen.
6. Desinfiser membranen på Tego®.
7. Flush kateterløpene før behandlingen, for å kontrollere flow.
8. Desinfiser membranen på Tego®.
9. Kople til blodslangene og gjennomfør behandlingen.
10. Kople fra blodslangene.
11. Desinfiser membranen på Tego®.
12. Skyll dialysekateteret med 10 eller 20 ml saltvannsløsning, jmf lokal prosedyre.
13. Desinfiser membranen på Tego®.
14. Sett inn aktuell kateterlås i hvert kateterløp. Tego® rommer 0,06ml.
15. Desinfiser membranen på Tego®.

Hemodialysebehandling 2+3

1. Desinfiser membranen på Tego®.
2. Aspirere 3-5 ml fra hvert kateterløp for å rense lumen i kateteret. Kast sprøytene.
3. Desinfiser membranen på Tego®.
4. Flush kateterløpene før behandlingen, for å kontrollere flow.
5. Desinfiser membranen på Tego®.
6. Kople til blodslangene og gjennomfør behandlingen.
7. Kople fra blodslangene.
8. Desinfiser membranen på Tego®.
9. Skyll dialysekateteret med 10 eller 20 ml saltvannsløsning jmf lokal prosedyre.
10. Desinfiser membranen på Tego®.
11. Sett inn aktuell kateterlås i hvert kateterløp. Tego® rommer 0,06ml.
12. Desinfiser membranen på Tego®.

Det er viktig å holde i Tego® når dialyseslanger og sprøyter kobles fra og til kateteret. Slik reduseres belastningen på kateterets luerkobling. Desinfiser Tego® ved å benytte desinfeksjonsmiddel av standard type, eks 70% isopropylalkohol. Membranen på Tego® rengjøres ved å utføre kraftfulle, sirkulære bevegelser i 3 sekunder.