

Tego® -turvakorkki

Tego -korkkia käyttäessä on hyvä huomioida seuraavat asiat:

- Pidä kiinni Tego -korkista kun yhdistät ja irrotat dialyysiletkut
- Yhdistä dialyysiletku ensin painamalla letkun pää membraanin läpi ja sen jälkeen kiertämällä (1/4 kierrosta) korkki kiinni suoraan ja huolellisesti.
- Vältä dialyysiletkun liian tiukkaa kiertämistä. Tämä voi vaurioittaa suojaavaa silikonikalvoa.
- Jos mahdollista käytä vacutaineradapteria jossa luerlock kiinnitys. Jos ei mahdollista yhdistä vacutaineri samalla tavalla kuin veriletkut (painamalla ja kiertämällä 1/4 kierrosta). Älä paina vacutainerin päätä liian pitkälle, tämä voi vaurioittaa Tego -korkkia

